


**IMPORTANTE**

Colocar al menos 60 pelos con bulbo, LIMPIOS (sin bosta).

Cierre el sobre para evitar contaminación.



**MUESTRA DE PELO PARA ANÁLISIS DE ADN**

N° DE MICROCHIP


SOLICITANTE:.....

RAZA:..... N° DE CRIADOR:.....

RP:..... SEXO:.....

NOMBRE:.....

USO LABORATORIO



**IMPORTANTE:**  
ES OBLIGATORIO COMPLETAR  
LOS DATOS SOLICITADOS.

**POR FAVOR, PARA LA TOMA DE LA  
MUESTRA SIGA LAS INSTRUCCIONES  
PRESENTES AL REVERSO DEL SOBRE**

ANTE CUALQUIER DUDA COMUNIQUESE  
CON EL LABORATORIO  
Tel./Fax: 011-4771-1366 /1982 (8.00 a 14.00)  
e-mail.: infolab@sra.org.ar

---

**INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA**

**PELO**

- IDENTIFIQUE CORRECTAMENTE EL ANIMAL.
- LIMPIE LA COLA DEL MISMO.
- SEPARE UN MECHÓN DE 60-80 PELOS.
- **EN EQUINOS:** DE LA CRIN O DEL NACIMIENTO DE LA COLA.
- **EN BOVINOS:** DEL EXTREMO INFERIOR DE LA COLA (BORLA).
- ENROJILELO EN EL DEDO ÍNDICE Y TIRE.
- VERIFIQUE LA PRESENCIA DE BULBOS PILOSOS (PELO DE RAÍZ).

**SEMEN**

**CERRAR EL SOBRE**

- IDENTIFIQUE LA **PASTILLA** O **PAJUELA** DE SEMEN A ANALIZAR
- **PAJUELA:** COLOQUELA EN UN SOBRE BIEN IDENTIFICADO.
- **PASTILLA:** COLOQUELA EN UN TUBO LIMPIO Y ESTE EN UN SOBRE CORRECTAMENTE IDENTIFICADO.
- ESTE TIPO DE MUESTRAS PUEDEN REMITIRSE AL LABORATORIO A TEMPERATURA AMBIENTE.
- EL DESCONGELADO DE LA MUESTRA NO AFECTA EL ANÁLISIS DE ADN.

Recortar por los bordes.  
Doblar y pegar las solapas. No abrocharlas.