

Recortar por los bordes.  
Doblar y pegar las solapas.  
No abrocharlas.



## MUESTRA DE ADN PARA MASCOTAS

Nº DE MICROCHIP

SOLICITANTE:.....

PROPIETARIO:.....

NOMBRE DEL EJEMPLAR:.....

NO USAR



### DATOS PARA EL ENVÍO DE LA MUESTRA

Para la toma de la muestra, siga las instrucciones al reverso del sobre.

Contacto:  
Tel./Fax: 011-4771-1366/1982  
(8-14hs, lu-vi)  
Juncal 4431, 2 º. CP: 1425  
E-mail: infolab@sra.org.ar

### CERRAR EL SOBRE

- Usar EDTA como anticoagulante (no heparina).
- Homogeneizar la sangre con el anticoagulante.
- Conservar y enviar refrigerado (no congelado).

### SANGRE CON ANTICOAGULANTE

- Desde las 8-10 semanas de edad, evitando el periodo de lactancia y la ingesta de comidas.
- Enviar 4 cepillos en este sobre (dejar secar después de la toma de la muestra) • No usar el mismo sobre para diferentes animales.
- La conservación y envío es a temperatura ambiente.

### CEPILLO CITOLOGICO

### CANINOS

### HISOPOS

### FELINOS

- Desde las 8-10 semanas de edad, evitando el periodo de lactancia y la ingesta de comidas.
- Enviar 4 cepillos en este sobre (dejar secar después de la toma de la muestra)
- No usar el mismo sobre para diferentes animales.
- La conservación y envío es a temperatura ambiente.

**INSTRUCTIVO en la web: <https://www.sra.org.ar/laboratorio-instructivos-filtros/>**