



Toma de muestra ADN caninos

- El dueño puede realizar la toma de muestra, no es indispensable un veterinario.
- El test puede efectuarse **a partir de las 4 semanas de edad**. Se recomienda aislar a cada cachorro de la madre y compañeros de camada, para no contaminar las muestras. Si el animal hubiera ingerido alimentos, aguardar 30 minutos.
- Se requieren 4 cepillos por ejemplar: emplear citobrush o cepillos interdentes grandes tipo **GUM**. Pueden ser adquiridos en farmacias y comercios de insumos médicos, ser retirados en el laboratorio o solicitar su envío (costo a cargo del solicitante).
- Los cepillos con las muestras pueden conservarse durante varias semanas a temperatura ambiente.





Procedimiento para la toma de muestra

1. Introduzca el cepillo entre la encía y la cara interna de la mejilla, gire el mismo 8-10 veces sobre la mejilla. Retirar y dejar secar.
- **IMPORTANTE:** No recoger saliva. El diagnóstico se realiza sobre el ADN presente en las células extraídas de la cara interna de las mejillas, por lo cual, la saliva no es un material válido. Remitir las muestras secas.
2. Repetir esta operación 4 veces utilizando distintos cepillos.
3. Lavarse las manos o cambiar los guantes antes de tomar muestra a otro animal para prevenir la contaminación de las muestras entre sí.
4. Remitir 4 cepillos por ejemplar en el sobre provisto por la SRA. Junto con las muestras deberá enviar la Solicitud de análisis.



Los cepillos pueden conservarse durante semanas a temperatura ambiente.

Una guía audiovisual instructiva:

<https://www.youtube.com/watch?v=n-zicSAEIDg>





Remisión de muestras

- El sobre con las muestras y la solicitud de análisis pueden entregarse/abonarse personalmente en el Laboratorio, de Lu-Vi de 8:00 -14:30 hs.
- Alternativamente, pueden entregarse, a través de un servicio de mensajería/correo, en la guardia del predio de acceso al Laboratorio (Juncal 4431), de Lu-Vi, de 8:00 -21 hs. En ese caso, deben remitirse: el sobre con las muestras, la solicitud de análisis y el comprobante de pago, si el mismo se efectuó por transferencia bancaria.
- Sobre y solicitud de análisis pueden descargarse de: <http://www.sra.org.ar/laboratorio-instructivos-filtros/#>. Seleccionar Caninos.
- Formas de pago: <http://www.sra.org.ar/laboratorio-instructivos-filtros/#>. Seleccionar Caninos. (Datos de Cuentas Bancarias).

Entrega de resultados:

Los resultados, se enviarán por e-mail, en un lapso de 10 a 15 días posteriores a la recepción de la muestra y documentos requeridos.



Datos de contacto:

☎ (011) 58611211/12

📞 +549 11-5039 4566

www.sra.org.ar